


## 1. 使用方式

- (1) 輕壓保護蓋兩側拉開探頭保護蓋。
- (2) 每次量測請使用乾淨、無破損之新耳套，並保持耳道清潔。  
請依下列說明安置耳套，以確保量測之準確。更換方式：
  - a. 將耳套之無薄膜面放入輔助環凹槽
  - b. 將輔助環中心對準探頭中心裝入到底
  - c. 直到探頭上之耳套已固定

**⚠警告：輔助環及耳套等零件，請遠離用孩童。**

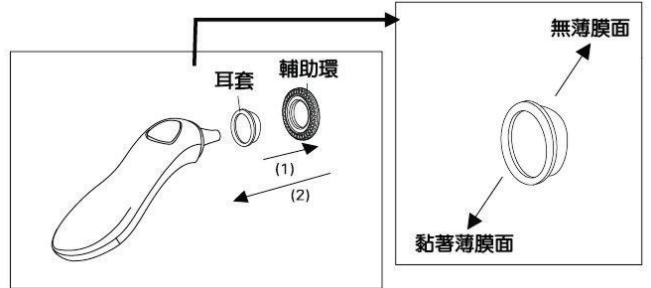

- (3) 按下"ON/MEN"按鍵(位於顯示螢幕下方)。
- (4) 待顯示窗內所有文字圖形出現後，可聽到 2 聲嗶響，即可開始準備測量。
- (5) 輕輕的將耳道往後拉，使耳道變直，並固定受測者頭部，輕將耳溫計放入耳道內，量測時請正確握持耳溫計，如右圖示。
- (6) 量測耳溫：用食指輕輕按下"量測按鍵"1 秒聽到嗶聲後放開，並將耳溫計從耳道中拿出，讀取液晶顯示之量測溫度。
- (7) 自動關機：若一分鐘內未操作耳溫計，則其會自動關機，以增長電池使用壽命。



## 2. 記憶功能(讓您在使用中可比較體溫變化情形。)

如果量測體溫是在正常溫度範圍內，即 34°C 至 42.2°C (93.2°F 至 108°F)，則每次關機前所量測的最後一筆溫度資料會自動記憶。讀取記憶之量測值，請按"ON/MEN"按鍵，液晶螢幕會顯示上次關機存入溫度(最新記憶存放在記憶 0，上一次為記憶 1)；重按"ON/MEN"按鍵以讀取記憶 2，重覆此動作可讀取更多記憶量測值。

型號：TH889

Care for a Healthy Life

**APEX**

衛署醫器製字第 002143 號

請妥善保存本產品使用說明書，請在使用前閱讀，並遵照本說明書指示使用本產品。

## 安全性注意事項


感謝您選擇雅博耳溫槍，本耳溫槍為具有自動溫差校正功能的紅外線接收

耳溫槍，能提供您更人性化的操作方式及準確性。

**⚠警告：告知您可能造成個人傷害，或導致其他損害之危險情況或行為，提供重要即時的安全訊息。**

## 外觀介紹

**附加冷光功能：**測量之後，背光會自行啟動，自動關閉。

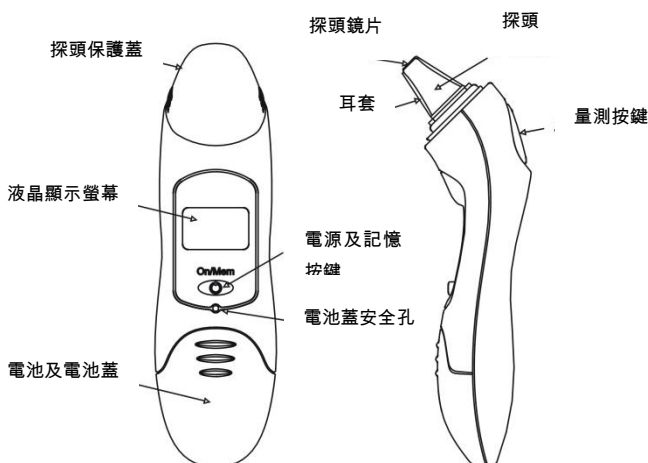

## 3. 警告及注意事項

- (1) 每次量測時請使用乾淨、無破損之新耳套，並保持耳道清潔。
- (2) 每次使用後換裝新耳套或清潔使用過的耳套，以確保量測準確度及避

免交叉感染。

(3)輔助環及耳套等零件，請遠離兒童。

(4)清潔探頭鏡片請使用棉花棒或軟布沾水或酒精輕輕擦拭，且不得將本產品浸水或放置於液體中。

(5)套上新耳套前讓鏡頭完全乾燥 30 分鐘以上，並避免 10°C 至 40°C 溫度範圍外之陽光直接曝曬。

(6)當低電量圖形顯示於液晶螢幕左上方時，表示需要更換電池。

(7)請勿將本產品應用於非人體耳溫測量之用途。

(8)更換電池前請關機。

#### 4.更換電池：

更換電池前請關機，假設更換電池時電源為開啟狀況，可能會發生故障，若發生故障請重新開機。

廢電池請回收

### 5.華氏/攝氏轉換

改變液晶顯示螢幕中之華氏 / 攝氏設定：開啟電源前先按下"量按鍵"不放手，再按下



"ON/MEN"按鍵並保持"量測按鍵"不放手 3~5 秒後，此時螢幕會改變原單位°C或°F。

### 6.規格

電源：一顆鋰電池(CR2032 x 1)

量測範圍：34°C~42.2°C (93.2°F~108°F)

精確度：36°C~39°C (96.8°F~102°F)：±0.2°C (0.4°F)

其他溫度範圍：±0.3°C (0.5°F)

儲存溫度：-20°C~50°C (-4°F~122°F)

附加冷光功能

### 7.簡易故障排除

故障訊息	問題	解決方式
	機器忙碌中	等候 3~5 秒直到  停止閃爍。
	電池存量低無法量測	更換電池。
	無法正確讀取量測值	等候 3~5 秒直到  停止閃爍。
	機器顯示環境溫度快速轉變	讓耳溫計在正常室溫下 10°C~40°C(50°F~104°F) 靜候 30 分鐘。
	環境溫度在正常溫度範圍之外 10°C~40°C	將耳溫計放在正常室溫下 10°C~40°C(50°F~104°F)靜候 30 分鐘。
	故障 5~9,為系統不正常工作	取出電池，等候一分鐘後再裝上電池，重新操作，如果故障訊息無法消除，請與經銷商連絡。
	量測溫度高過 42.2°C(108.0°F)	確定耳套是否完整後重新操作。
	量測溫度低於 34°C (93.2°F)	確認耳套和鏡片是否清潔後，重新量測。
	開機後無法進入待機狀態	請立即更換電池。

藥商名稱：雅博股份有限公司 Apex Medical Corp.

藥商地址：23679 新北市土城區民生街 9 號

T +886 2 2268 5600 F+886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@apexmedicalcorp.com

www.apexmedicalcorp.com

製造廠名稱：雅博股份有限公司委託熱映光電股份有限公司製造

製造廠地址：新竹縣新竹科學工業園區工業東九路 3 號 1 樓

Print-2017 版權所有，翻印必究

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更之權利

批號與製造日期：標示在彩盒上 (機身標示批號)