

雅博減壓氣墊床獨享

一通電話，到府維修



10萬次測試，十分在乎

雅博氣墊床從研發階段起，進行各項大大小小的測試。從直接接觸人體的上蓋布料通過生物相容性(通過細胞毒性試驗)、使用環境的溫溼度、電磁波測試到運送碰撞測試。其中床管經過10萬次的充、放氣測試，只因我們在乎產品能1天24小時全天候有效運作，守護使用者，預防褥瘡的發生。

雅博，台灣品牌的氣墊床照顧世界60多國的使用者

累積了近30年的研發製造經驗，雅博除了透過臨床的驗證來證明產品是安全的，更在乎使用者的需求，舉例針對亞洲的潮濕氣候，雅博設計床墊必須要能出氣以保持乾燥。不管在材質、使用特性或生活習慣都必須依賴經年累月的經驗值，適度為產品調整。雅博的專業經驗，氣墊床的最佳表現。

Wellell

雅博集團

頭枕功能


多美適2 “雅博” 減壓氣墊床(未滅菌)

防止臥床褥瘡傷口的發生，避免受到長時間壓迫。


預防褥瘡！從減少壓迫開始

三管交替


單管輪流充氣\洩氣的循環，定時改變身體受壓部位，以達到交替減壓的效果

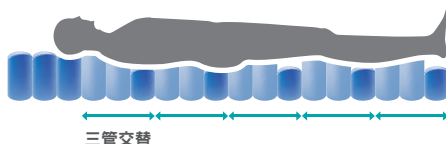

其他在病患照護上亦需注意部分

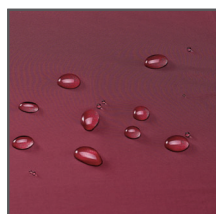


Nylon/PU上蓋布料
防潑水、透溼的材質並通過生物相容性測試之細胞毒性試驗，肌膚不易產生刺激感

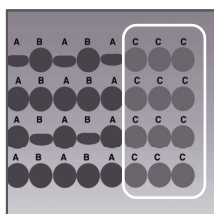

頭枕功能

頭部前三條單管不參與交替，固定的壓力讓使用者睡得更安穩舒適

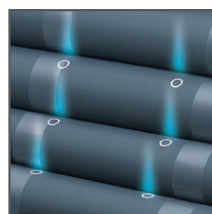

溼熱對皮膚的影響
床管的微量出氣孔，帶動床體內部氣流，減少溼氣與熱氣累積

照護者的使用便利性也該被重視



體重標示參考
輕鬆依據使用者體重選擇，設定壓力真簡單



CPR快速洩氣閥

當需要進行CPR急救時，此裝置可快速排出床墊內空氣



可調式掛勾
方便適用於各種尺寸的床板

衛署醫器製壹字第001583號

北衛器廣字第10805054號

產品規格

主機	電源需求	AC 120V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
床墊	材質	床罩Nylon貼合PU 床管Nylon貼合PVC 底座Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管，前三管不交替，第4-11管出氣孔 配有CPR快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬80 × 高10.2公分
	最大載重	140公斤

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。
衛署醫器製壹字第001583號/北衛器廣字第10805054號

醫療器材製造商
雅博股份有限公司
醫療器材販售商
雅適股份有限公司
236044 新北市土城區民生街9號1樓
T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526
消費者服務專線 0800 054 133
customer@wellell.com
tw.wellell.com
Print-2023/07 版權所有，翻印必究