

# “雅博”低週波治療器

## “APEX” Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator

型號：GM350PP

Care for a Healthy Life



衛部醫器製字第 006696 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

### 一、產品敘述

雅博低週波治療器，其原理係採用脈動電能以各種波型或頻率，藉由導電電極經皮膚來傳達，而達到預期之效果。

### 二、產品效能

促進局部血液循環、減輕肩膀酸痛及末梢神經麻痺；舒緩關節等的急性疼痛症狀；針對一般身體疼痛部位進行疼痛舒緩。

副作用：皮膚刺痛或使用電極片處燙傷為可能之副作用。

禁忌症：裝置心臟節律器、孕婦、會引起心電圖儀器警報者、出血及急性疼痛、接受抗癌治療者等應避免使用本產品。

◎ 本產品可由使用者自行依照說明書使用或在專業人員指導下使用

### 警告及注意事項

1. 有下列症狀或疑似出現下述狀況者，請於使用本產品前諮詢醫師的意見：急性靜脈阻塞、抗凝血治療所誘發出血傾向、坐骨神經痛或其他神經痛、發炎、感染、皮膚疾病等。
2. 於心臟區域附近使用本產品可能增加心臟纖維性顫動的風險。
3. 不要在有可燃氣體的場所使用本產品。
4. 身體潮濕時請勿使用本產品。
5. 使用本產品前請檢查本產品是否有損壞。
6. 本產品請存放於孩童無法取得的地方。
7. 請勿於駕駛或操作機器中使用本產品。

8. 請勿用於有傷痕、疤痕或易敏感皮膚，否則易有電流過度集中而造成燒傷或刺痛感。此時請先關機並重新調整電極片位置，可上下左右移動使電極片位置避開此敏感皮膚以避免刺痛感或皮膚燒傷。
9. 前頸部及臉部請勿使用本產品。

### 三、配備及電器規格

- 主機 1 台
- 導電線 2 條
- 包裝盒 1 個
- 電極片 4 片裝（衛署醫器製字第 002226 號）
- 9V 電池 1 個
- 操作手冊 1 本



GM350PP (122x25x65mm/140g)  
機種其外形及尺寸請參考下面圖表



輸出波形	非對稱性方波	電源	9V 乾電池一個
輸出頻道	兩個	尺寸	122 x 25 x 65 mm
輸出電流	0~80 mA (500 ohm 負載) 可調整	重量	約 140 g (含電池)
輸出頻率	2-120Hz 固定	功能模式	P1 - P9
輸出波寬	150-260µs 固定		
定時	15 - 60 分鐘或持續輸出		
單一脈衝最大輸出電量: 21 µC (誤差範圍: +/- 10%)			

- 註：1. 表中機型後面英文碼為：PP: Pre-program TENS  
2. 功能代碼為：Burst：粹發波(Burst)，為一種每秒2群之斷續波。  
C：連續波(Continuous)，連續固定輸出之波。  
M：波寬調變波(Width Modulation)，為一種波寬大小調變波。  
MR：頻率調變波(Rate Modulation)，為一種頻率快慢調變波。  
D-D：高、低兩種頻率之連續波(C)交互變化。  
3. GM350PP 增加一組D-D功能，為P1 - P9 共九種上述功能模式所組合而成預設參數(Preprogram)TENS。  
4. 本系列機種已取得FDA 之510k 認可。本公司亦為國內衛生福利部登錄之合格醫療器材GMP廠，且為ISO 9001及ISO 13485 合格認證之醫療器材廠。

藥商名稱：雅博股份有限公司 Apex Medical Corp.

藥商地址：23679 新北市土城區民生街 9 號 (土城工業區)

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@apexmedicalcorp.com www.apexmedicalcorp.com

製造廠名稱：雅博股份有限公司委託吉懋科技有限公司淡水廠製造

製造廠地址：新北市淡水區中正東路二段 29-5 號 11 樓

製造批號：標示於產品機身上

Print-2020 版權所有，翻印必究

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更之權利