


“雅博”數位恆溫濕熱敷墊 (未滅菌)

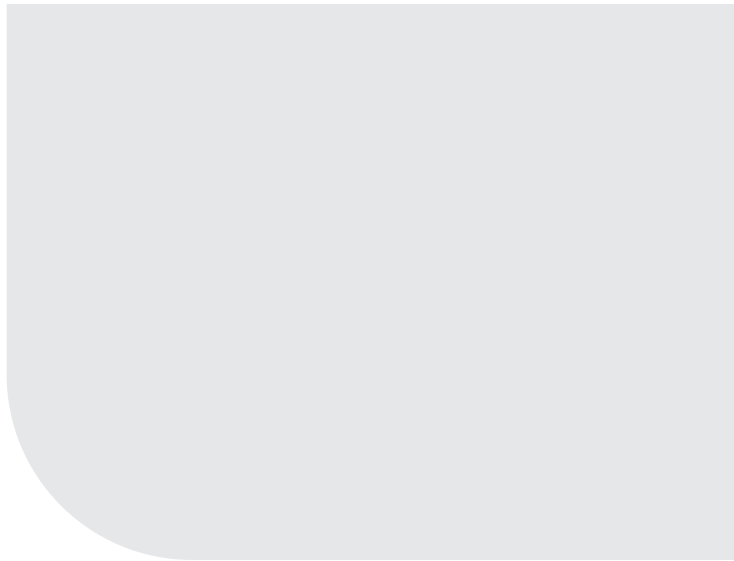

Be well, Live well
Wellell

許可字號：衛部醫器製壹登字第 a00274 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料。

一、產品敘述及用途

1. 本產品可提供體表乾熱治療的電力醫用器材，可在使用中維持一定的溫度。
2. 自動產生水蒸氣，將熱氣深入皮下組織加強熱敷效果，減少皮膚乾癢。
3. 遠紅外線生化陶瓷，遇熱釋放遠紅外線光波。

二、產品功效

1. 促進全身血液循環。
2. 有效舒緩肌肉疲勞。
3. 身體組織更為活絡。


三、使用前安全注意事項

1. 使用本產品前，請詳閱「使用說明書」及「安全注意事項」以便正確使用。
2. 若使用不當或無視安全注意事項，有可能發生人身傷害及物品損壞危險。
3. 使用完或中途離開本產品，請務必關機並拔出電源插頭。
4. 如運用在其他用途（如：睡眠中使用、其他物品上保暖），可能產生不可預知的危險。
5. 請勿將濕熱電毯置於毛毯、棉被及其他覆蓋物內使用。
6. 請勿重摔濕熱電毯。
7. 使用時勿在治療部位塗抹任何液體、藥膏、乳液等。
8. 使用時如感不適，請立即停止使用。
9. 使用時須將濕熱電毯置於上方，不可壓在身體下。
10. 珊瑚砂會吸附環境中水氣，而可能造成一點不自然味道，在多次使用後會逐漸遞減。

⚠ 警告事項

1. 禁止使用於嬰兒。
2. 禁止使用於癱瘓者及對溫度感覺遲鈍者（例如：孕婦、糖尿病患等）。
3. 禁止使用於熟睡者或無意識患者。
4. 請勿於易燃環境下，或鄰近充滿氧氣及氧氣儲存設備旁使用。
5. 請勿坐或壓在熱敷墊上。
6. 請勿以強力壓折及扭曲方式使用或收納熱敷墊。
7. 請勿以拉扯電線方式拔去插頭。
8. 請勿以別針或其他金屬物品固定熱敷墊，以避免觸電。

四、產品各部名稱

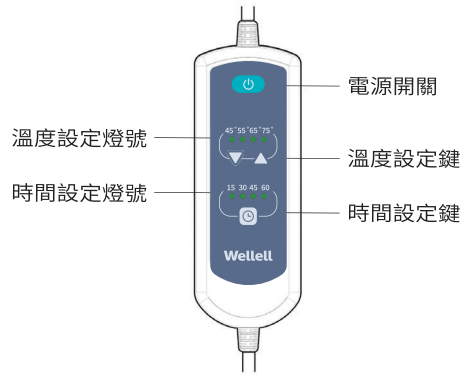

五、使用方法

1. 插上電源
2. 開機（按下電源開關）
3. 按壓溫度設定鍵設定溫度（45°C、55°C、65°C、75°C）
4. 按壓時間設定鍵設定時間（15、30、45、60 分鐘）
5. 療程結束即自動關機

六、產品規格

尺寸	詳見外包裝標示
電壓	110V±2 / 60HZ±10
溫度設定	45/55/65/75 °C
時間設定	15/30/45/60 分鐘
內容充填物	珊瑚砂

醫療器材商名稱：雅適股份有限公司

醫療器材商地址：新北市土城區民生街 9 號 1 樓

T +886 2 2268 5600

F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

www.wellell.com

製造業者名稱：雅適股份有限公司委託仙佳美企業有限公司製造

製造業者地址：台南市關廟區北花里花園二街 5 號 1 樓

製造批號：標示於產品機身上

Print-2023 版權所有，翻印必究

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更之權利

2024.08 V1.3