

“雅博”噴霧治療器

“Wellell” Nebulizer

型號：AP-100100

使用說明書



Be well, Live well
Wellell

衛部醫器陸輸字第 001095 號

使用本產品前請先詳細閱讀說明書，並遵照指示使用

重要安全準則

請妥善保存本說明書

危險：避免觸電的危險

- 1 每次使用後，請立即拔掉插頭。
- 2 請勿在沐浴、洗碗，或是任何可能接觸到水源的情境中使用。
- 3 請勿將本產品放置或儲存在容易掉入浴缸或水槽之處。
- 4 請勿將本產品放置或掉入水及任何液體中。
- 5 若不慎將本產品掉落至水中，請勿直接拾取，應立即將插頭拔除後，方可拾起。

警告：避免燃燒、觸電、起火，或任何導致個人受傷的危險

1. 請依照產品指示功能使用本產品，並且在醫事人員的指示下使用。
2. 請勿使用非原廠建議的配件。
3. 當插頭連接時，應避免置本產品於不顧。
4. 在以下任何狀況發生時，請勿使用本產品。
 - (1) 插頭或電源線損壞。
 - (2) 產品運作不順。
 - (3) 產品掉落地面，或是已有其他損傷。
 - (4) 產品掉入水中之後。請將本產品退還至經銷商或是本公司，做進一步的檢查及修復。
5. 請將電源線遠離高溫表面。
6. 在嗜睡或意識不清時，請勿使用本產品。
7. 請勿從本產品的任何開口中塞入任何異物。
8. 請勿在戶外使用，或是在噴霧產品（例如髮膠）及氧氣出口附近使用。
9. 請將本產品連接至適當的接地插座上。

注意、提醒及警示事項之說明

- 請注意**：表示請您特別留意的資訊。
- 提醒您**：表示提醒您遵守正確的操作及保養流程，以避免產品的損壞或導致產品的故障。
- 警示**：告訴您務必小心遵守正確的使用方法，以免造成個人傷害。

產品符號解釋

0	關機；主機電源關閉
I	開機；主機電源啟動
~	交流電
IPX0	包裝設備並無防水的設計
△	注意！使用前請先閱讀使用說明書及內附文件
回	Class II
⚡	BF符號，表示產品依照BF設備防止觸電的保護等級

1. 產品介紹

1.1 產品的主要功能

本產品能在居家環境中進行噴霧治療。本產品內的加壓裝置，可將液狀藥物霧化成微小粒子，使藥物能迅速容易地被人體吸入呼吸道及肺部，並沉積於呼吸道及肺部內，以達治療功效。本產品適用於成人及孩童，請依照專業醫事人員的指示使用；適應症包括氣喘、慢性支氣管炎、上呼吸道感染、慢性阻塞性肺疾病，以及其他呼吸道疾病。

提醒您：除了上述的使用目的之外，請勿將本產品用作他途。

1.2 安全性注意事項

當使用本產品，尤其是在兒童接近時，請務必遵照基本的安全注意準則。請在閱讀、了解本產品使用說明書後，才能進行產品的操作、安裝，及保養，以避免受傷及損壞的狀況發生。本說明書中重要的訊息，將以以下的形式註明。

危險：對於將造成嚴重傷害甚至導致死亡的危險情況，提供最緊急的安全訊息。


警告：對於可能造成嚴重傷害或其他損害的危險情況，提供重要的安全訊息。

提醒您：對於避免造成產品損害的情況，提出建議。

插頭的設計是一端較另外一端稍寬，為避免觸電的情形發生，請順勢將插頭插入插座中。若是無法插入，試著將插頭轉向再插一次。若是仍然插不上去，請聯絡專業人員，切勿自行修改插頭。

2. 產品敘述

2.1 主機部分

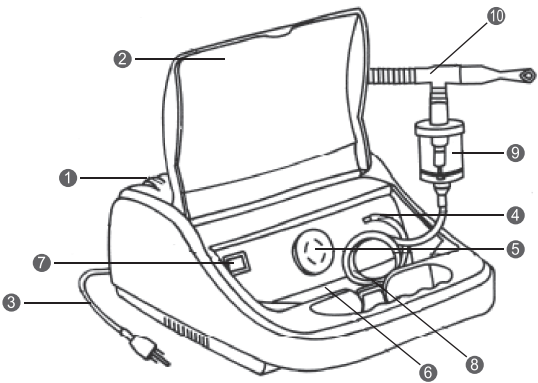

- | | | |
|----------|----------------|--------|
| 1. 主機 | 2. 收納上蓋 | 3. 電源線 |
| 4. 出氣口 | 5. 濾棉蓋（濾棉位在內部） | |
| 6. 配件收納處 | 7. 電源開關 | 8. 風管 |
| 9. 藥杯 | 10. 口含管 | |

666008-5000 V1.1